



식품의약품안전처



수신 수신자 참조
(경유)

제목 의료기기 안전성 정보 알림[자기공명전산화단층촬영장치]

1. 귀 단체(기관)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 최근 언론 등을 통해 경남 김해시 소재 병원에서 자기공명전산화단층촬영장치(MRI)를 사용하여 영상촬영을 하려던 환자가 기기에 갑자기 빨려든 금속제 산소통에 끼어 사망한 사고가 발생하였다는 안전성 정보가 입수되어, 의료기관 및 의료진에게 아래 사항을 준수할 것을 권고하니, 귀 단체(기관)의 회원에게 적극 홍보하여 주시기 바랍니다.

- MRI 촬영실 내부에 산소통, 환자운반기구, 보행보조기구 등 금속성 물질과 같은 자성물체가 없음을 반드시 확인할 것.
- MRI실 내부는 항상 강력한 자기장이 형성되므로 자성물체를 반입하지 말 것.
- 특히, 환자운반기구 아래부분(시트로 가려진 곳 등)의 안보이는 곳에 놓여진 금속 트레이 등 금속성 물질을 반드시 확인할 것.

3. 아울러, 의료기기 관련 부작용 등 이상사례 인지 시, 우리 처 전자민원창구 (<http://emed.mfds.go.kr>>보고마당>이상사례보고)를 통해 즉시 보고할 수 있도록 널리 알려주시기 바랍니다. 끝.

식품의약품안전처장



수신자 한국의료기기안전정보원장, 의료기관평가인증원장, 대한병원협회장, 대한중소병원협회장, 대한의사협회장, 대한개원의협회의장, 대한영상의학회장, 대한방사선사협회장, 대한자기공명과학회장, 의료기기 안전정보 모니터링센터장(17개기관)

주무관 손혜경 연구관 양원선 의료기기안전평가 전결 2021. 10. 19.
과장 성홍모

협조자

시행 의료기기안전평가과-5020(2021. 10. 19.) 접수

우 28159 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187, 식품의약품안전 / www.mfds.go.kr
처 행정동 5층 515호 의료기기안전평가과

전화번호 043-719-5007 팩스번호 043-719-5000 / mild1763@korea.kr / 비공개(5)

힘내라 대한민국!